

Manual til 4Wheler Turvogn

Afsnit	Indhold	Side
1.	Generel information	1
1.1	Indledning	1
1.2	Anvendelse	2
1.3	Overensstemmelseserklæring	2
1.4	Garantibestemmelser	2
1.5	Service og reparation	2
2	Sikkerhedsanvisninger	3
2.1	Generelle sikkerhedsanvisninger	3-4
3.	Levering og forberedelse af ibrugtagning	5
4.	Tilbehør - og tilpasningsmuligheder	6
4.1	Montering af front	7
5.	Mål	8
6.	Recirkulering	9

1

Generel information

1.1 Indledning

Tak, fordi de valgte 4Wheler Turvogn. Vi har udviklet dette kvalitetsprodukt for at gøre opgaverne lettere og mere sikre. Denne manual skal bistå dig med brug og vedligeholdelse af vognen. Læs følgende anvisninger for at sikre, at du bruger dette produkt som anbefalet. Hvis der er yderligere spørgsmål, eller hvis du støder på problemer, så kontakt din hjælpemiddelleverandør.

Vi håber, at 4Wheeler indfrier dine forventninger. Der tages forbehold for tekniske ændringer uden varsel i forbindelse med konstruktionen beskrevet i denne manual.



1.2 Anvendelse

4Wheeler vogne, er særligt velegnede til personer med behov for bevægelsesassistance. Vognene er særligt egnede til transport, især med henblik på mere vanskeligt terræn.

Behovet for assistance kan skyldes:

- atypisk muskulatur
- tab af lemmer
- ustabile led
- led kontraktur
- ledskader
- generel svagelighed

Vognen bør ikke anvendes som opholdsplads i dagligdagen.



1.3 Overensstemmelseserklæring

KFN ApS erklærer som eneansvarlig fabrikant, at 4Wheeler vognen er i overensstemmelse med test 93/42/EEC Retningslinjerne. *CE-mærket iht. Medicinsk Direktiv.*

1.4 Garantibestemmelser

Garantibestemmelserne dækker kun, når produktet anvendes i henhold til de angivne betingelser, til de beregnede formål og i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

1.5 Service og reparation

Service og reparation i forbindelse med 4Wheeler bør kun udføres af autoriserede KFN,s forhandlere. Hvis der opstår problemer, så kontakt KFN ApS. Til reparation og service kræves følgende værktøjer:
Unbrako nøgle 6 mm



2 Sikkerhedsanvisninger

Læs hele manualen inden brug!

Sæt dig ind i, hvordan produktet skal håndteres, inden ibrugtagning.

Indøv brugen af produktet.

Du er ansvarlig for barnets sikkerhed.

Hvis manualens anvisninger ikke følges, kan det påvirke barnets sikkerhed.

Det er ikke muligt at dække alle omstændigheder og uforudsigelige situationer med denne manual.

Det er en forudsætning, at personer, der bruger produktet, udviser fornuft, omhu og forsigtighed.

Personen, der bruger produktet og dets tilbehør, bør forstå alle anvisninger og være i stand til at forklare dem til enhver bruger af produktet og dets tilbehør.



2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Manglende gennemlæsning af manualen kan resultere i skade på person eller produkt.

- Tjek følgende punkter før vognen tages i brug:
 - alle dele er forsvarligt fastspændt på rammen
 - alle håndtag og skruer er forsvarligt fastspændt
 - bremsen fungerer og er monteret korrekt
- Brems altid vognen før ind- eller udstigning
- Husk ved enhver ændring af vognens balancepunkt øges risikoen for at stolen tipper bagover.
- Tjek omhyggeligt, at hjulene er forsvarligt monteret
- Hjulene må ikke afmonteres mens brugeren sidder i vognen
- Børn må ikke stå eller sidde på knæ imod kørselretningen vognen kan tippe.!
- Visse overflader på kørestolen, så som dele af rammen eller polstret kan i solen nå en temperatur højere end 41 °C



Vær særligt opmærksom i forbindelse med skråninger og hældninger for at forhindre,

- at barnet falder ud af vognen
- at vognen vælter
- at vognen ruller væk.

Hvis det er nødvendigt at parkere på en skråning, skal vognen vende opad med aktiverede bremsen.

Løft kun vognen i de dele, der er forsvarligt fastgjort:

- ramme fodrør
- bagaksel
- skubbehåndtag/skubbestang.



Dæktrykket har stor indvirkning på håndtering af vognen. Korrekt pumpede dæk øger vognens manøvreedygtighed betragteligt. Dæktrykket bør være mindst 2 bar (200 kPa) (29 PSI).

Hold emballagematerialer på afstand af børn. Plastemballage udgør en kvælningssfare. Efterlad aldrig barnet i vognen uden opsyn, selv når barnet er fastspændt, og bremsen er aktiveret.

Den statiske stabilitet er en hældning på 22°. Anbringelse af tunge tasker eller andre former for vægtbelastning på skubbehåndtagene vil give en forringet stabilitet. Den maksimale vægt, der kan medføres i opbevaringsposen, er 3kg. Vognen er kun beregnet til transport af et barn ad gangen.





Ved parkering trækkes bremsegrebet, hvorefter den røde låsepæl sættes i indgreb. Trækkes bremsen vil låsepælen automatisk forlade indgrebet. Bremsene kan med stor fordel anvendes til at kontrollere vognen, både ved op og nedkørsel.



Ved stejle nedkørsler baglæns skal bremsene anvendes med stor forsigtighed. Bremsene vil her både vippe og dreje vognen. Med lidt øvelse kan bremsene være en stor aflastning for hjælperen.


Med Holder for drejelige forhjul monteret skiftes let imellem ligeløbende 16" hjul og drejehjul.





4 Solskærm - regndækken

Under kørsel kan solskærmen "hænge" bag vognen, siderne på solskærmen holdes samlede med velcro stroppen. Skærmen skubbes frem over styret, (styret sænkes under flytning) den bagerste velcro strop lægges omkring centeret af styret og strammes op. Side velcro monteres herefter stramt på der velcro der løber langs hele siden af vognen.

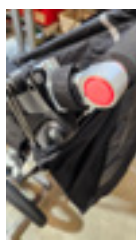

Styrets spændeøjler åbnes, styr sænkes, Spændeøjler lukkes, solskærm svinges over, spændeøjler åbnes og styrhøjde justeres.



Regndækken

Regndækken beskytter sammen med solskærmen mod det meste nedbør. Regndæknet monteres på velcro bånd som findes i begge sider af vognen i hele betrækkets højde, samt på fod betræk.



4.1 Montering af front og justering af styr,

Front (fodstykke) rammen skal altid placeres til stop.


Spændebøjlen kan justeres sådan at den altid fastholder styr og fodstykke.

Ved justering af fodstøtte vær opmærksom på de 4 halvmåner er på ders plads efter justeringen er afsluttet.



4.2 Justering af fodstøtte

Umbroko bolten i bette sider af fodstøtten løsnes, fodstøtten kan herefter skydes til den rette afstand. Stram begge bolte når den ønskede position er opnået. OBS vær opmærksom på at der skal være samme afstand i begge sider.

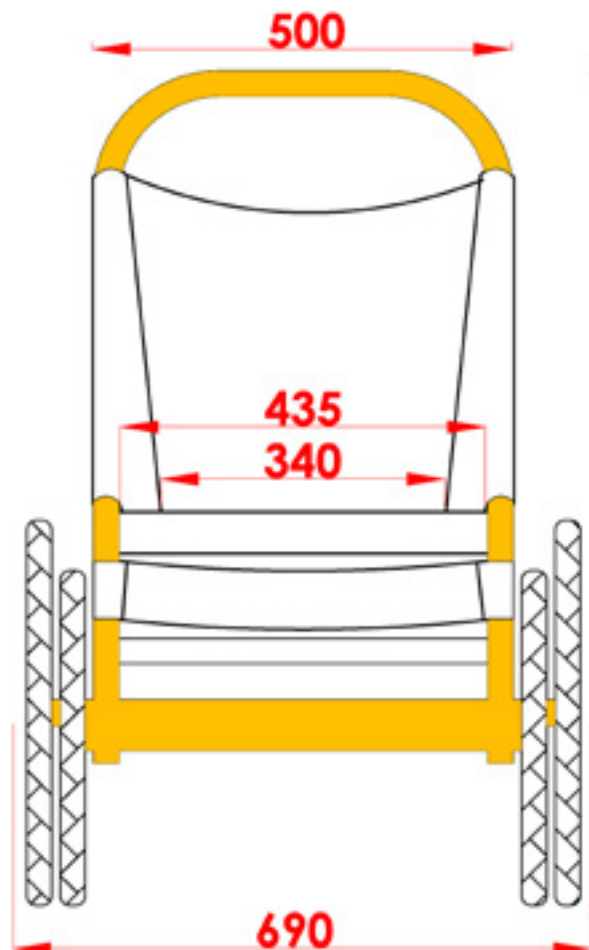

5 Vægt og mål

Mål er angivet i mm.

4Wheler

Sædedybde	450	
Sædebredde	435/340	
Underbenslængde	200/480	
Rygstøttehøjde	680	
Ryginkel	82 grader	
Vægt	13 kg	14 kg
Belastningskapacitet	80 kg	
Sammenfoldet længde	900 mm	

Information!

Tilbehør og tillægsprodukter nedsætter den maksimale belastningskapacitet for passagerer tilsvarende.

5.1 Levering

Kontrol ved modtagelse

Kontrollér, at samtlige dele er i overensstemmelse med følgesedlen.

En eventuel transportskade skal du straks anmelde til transportfirmaet. Behold emballagen, til transportfirmaet har kontrolleret godset, og man er kommet frem til en afgørelse.

Stropper på tilbehør er normalt ekstra lange for at opfylde alle behov. Sørg for at afkortelange stropper på tilbehøret, således at de ikke bliver fanget. For at undgå at enderne på stropperne trævler eller flosser efter afkortning, kan de smeltes sammen over en flamme (f.eks. fra en lighter)



6 Recirkulering

4Wheler kan inddeles i følgende komponenter:

- Stel (chassis)
- Plasticdele
- Polster
- Hjul, dæk og slanger
- Emballage

Chassis

Stellet er fremstillet i aluminium og er fuld recirkulerbart. Recirkulerbart aluminium har kun behov for 2-5 % af energisammenlignet med nyt produceret aluminium.

Plasticdele

Plasticdelene på stolen er fremstillet af plastic kaldet "Thermoplastic". Størstedelen er fremstillet i polyamid, der kan recirkuleres eller brændes i dertil godkendte anlæg.

Polster

Polstret er fremstillet af polyesterfibre, PUR. Den mest effektive måde at recirkulere delene på, er at brænde disse i dertil godkendte anlæg.

Hjul, dæk og slanger

- Drivringe, ringe, eger og nav er fremstillet af stål, rustfri stål eller aluminium og kan recirkuleres ifølge ovenstående.
- Dæk og slanger er fremstillet af gummi og kan genbruges iht. ovenstående.

Emballage

Al KFN emballage er fremstillet således at det passer til de produkter der forsendes, for på den måde at minimere unødigt spild af materialer. Al pap er recirkulerbart. Kontakt venligst din lokale genbrugsstation for at få korrekt information omkring håndtering af ovennævnte materialer.



POS-NR.	MENGE Quantity	Artikelnummer Article-No.	Beschreibung	Description
1	1	KFN-ALR-703-A06	Aluminiumrohr 30x20	Alloy tube 30x20
2	1	ALR20x3-440-M8	Aluminiumrohr M8	Alloy tube M8
3	1	KFN-B01-002-R	Aluminiumrohr mit Verbinder	Alloy tube with connector
4	1	KFN-B01-002-L	Aluminiumrohr mit Verbinder	Alloy tube with connector
5	2	KFN-B01-004	Aluminiumrohr mit Verbinder	Alloy tube with connector
6	2	KFN-B01-005	Aluminiumrohr gebogen mit Verbinder	Alloy tube bended with connector
7	1	KFN-B01-006	Dach	Top
8	4	KFN-AP-708	Aluminiumprofil	Alloy profile
9	2	KH-M8-75	Klemmhebel	Clamp lever
10	2	U-M-985-M8	Mutter DIN 985-M8	Nut DIN 985-M8
11	1	KFN-B01-001	Lenker mit Bremsgriffe	Handlebar with brake levers
12	1	KFN-B01-003	Aluminiumrohr mit Verbinder und Adapter	Alloy tube with connector and adapter
13	2	U-A12-40-8	Adapter 12 mm	Adapter 12 mm
14	1	BA-L70-S-TOP-16-01	Bremsanker	Brake anchor
15	1	BA-R70-S-TOP-16-01	Bremsanker	Brake anchor
16	1	R450/45-LSA-KFN-BL	Luftrad	Pneumatic wheel
17	1	R450/45-LSA-KFN-BR	Luftrad	Pneumatic wheel
18	4	QRA-90-VA-KFN	Quickreleaseachse	Quickrelease-axle
19	1	R400/45-LSA-KFN-L	Luftrad	Pneumatic wheel
20	1	R400/45-LSA-KFN-R	Luftrad	Pneumatic wheel
21	2	U-S-912-M8x30	Schraube DIN 912-M8x30	Screw DIN 912-M8x30



KFN ApS
Bondesvadvej 15
Dk-8300 Odder

Weight: 11641.83 g

Material:

Surface:

Scale: 1:10

Revision:

Drawn

Released

Allgemeintoleranz /
General tolerances
DIN ISO 2768 mK

Date
09.06.2020

Name
H. Ermel

Description:
KFN Buggy
KFN Buggy

Article number:
KFN-B01

Sheet 1
of 20

A3

Rev.

Change

Date

Name

Schutzvermerk nach /
protected by: DIN ISO 16016

Last saved: 09.06.2020

The information in this drawing is the property of KFN ApS. Any reproduction in part or as a whole without the written confirmation of KFN ApS is prohibited.

